

Handleiding

Pasinstructies voor de kinband

Lees onderstaande instructies nauwkeurig door voordat u de kinband gaat passen

De SleepPro Anti-snurk kinband, die om de kin en de bovenkant/achterkant van het hoofd wordt geplaatst, zorgt ervoor dat de kaken op elkaar blijven en de mond gesloten blijft tijdens de slaap. De kinband is een gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel, eenvoudig schoon te maken (met de hand of in de wasmachine) en makkelijk op te bergen of mee te nemen op reis. De SleepPro Anti-snurk kinband is zo ontworpen - gemaakt uit één stuk, met twee stelbanden - dat hij gedurende de nachtrust comfortabel zit en op z'n plaats blijft zitten.

Plaats de SleepPro Anti-snurk kinband om de kin en het achterhoofd zoals aangegeven op de achterzijde van deze handleiding. Om de kinband meer kracht uit te laten oefenen op de kaak, kunt u de stelbanden meer richting het voorhoofd verschuiven, eventueel zelfs zo ver dat de achterste en de voorste stelband op elkaar komen te liggen. Voor meer opwaartse druk kunt u de achterste stelband de voorste laten kruisen.

Experimenteer met de druk op de kaak door de stelbanden te verplaatsen en/of de positie van de kin te veranderen. Kortom: probeer uit wat het fijnst aanvoelt. Zit de Anti-snurk kinband eenmaal comfortabel, doe de band dan af zonder de instelling van de stelbanden te veranderen. Indien gewenst kunt u die op een later tijdstip altijd nog aanpassen.

Dankzij het tweebandsysteem blijft de druk op kin en hoofd tijdens de nachtrust comfortabel én blijft de Anti-snurk kinband gegarandeerd op z'n plek. Onthoud welke band u het liefst op welke positie op het hoofd draagt door naar het label te kijken.

Tip: Gebruik de Anti-snurk kinband in combinatie met een SleepPro mondbeugel of neusspreider.

Zo helpt de kinband bijvoorbeeld om de beugel in de mond te houden tijdens het slapen.

De SleepPro Anti-snurkband:

- is een eenvoudig, betaalbaar en duurzaam anti-snurk-hulpmiddel.
- is eenvoudig aan te brengen om de kin en over de boven- of achterkant van het hoofd.
- zit comfortabel en geeft onmiddellijk resultaat.
- is de meest voor de hand liggende behandeling in geval van snurken met open mond.
- zorgt ervoor dat u minder last heeft van een droge mond gedurende de slaap.
- is eenvoudig te reinigen, met de hand of in de machine.
- unisex en past iedereen.

Het perfecte hulpmiddel om snurken met open mond mee te behandelen

Past iedereen en zit comfortabel

- De SleepPro Anti-snurk kinband is een beproefd middel tegen snurken met open mond. Dankzij de kinband wordt monddroogte tijdens de slaap tot een minimum gereduceerd.
- Tijdens het slapen met de SleepPro Anti-snurk kinband zult u geen onnodig last of pijn ervaren. En kunt u ongestoord genieten van uw nachtrust.
- De Anti-snurk kinband heeft een slank design, is makkelijk in gebruik en eenvoudig te verstellen.

Eenvoudig in gebruik, passend te maken in een mum van tijd

- Doordat de kinband om de kin en om de boven- dan wel achterkant van het hoofd wordt aangebracht, blijft de mond van de 'snurker' 's nachts gegarandeerd gesloten. De band zal niet van z'n plek komen. Dankzij het exclusieve verstelbare tweebandsysteem is niet alleen draagcomfort gegarandeerd, maar ook dat de kinband tijdens de nachtrust perfect in positie blijft.
- De kinband is betaalbaar en duurzaam. De meeste 'snurkers' hebben na een paar nachten niet eens meer in de gaten dat ze de SleepPro Anti-snurk kinband dragen. Het hulpmiddel biedt 'snurkers' een onmiddellijke, non-invasieve oplossing tegen snurken. Omdat het hulpmiddel volledig verstelbaar is, kan het door iedereen, van elke leeftijd, worden gedragen.

Lees onderstaande instructies nauwkeurig door voordat u de kinband gaat passen

1.



2a




1 Plaats de kinband over de kin en over de boven- dan wel achterkant van het hoofd, zoals getoond hierboven.

2 Om de opwaartse druk te veranderen, plaats je de stelbanden richting het voorhoofd. De stelbanden mogen elkaar zelfs overlappen als je de druk wilt verhogen. Wil je de druk verlagen, beweeg de banden dan meer richting achterhoofd.

Het exclusieve tweebandssysteem helpt je de gewenste opwaartse druk te bereiken.

Als u eenmaal de juiste pasvorm te pakken hebt, kunt u de kinband eenvoudig afdoen en daarna weer gebruiken, zonder deze elke keer opnieuw passend te hoeven maken. Mocht u de instelling wel willen veranderen, dan kan dat wanneer u maar wilt.

2b

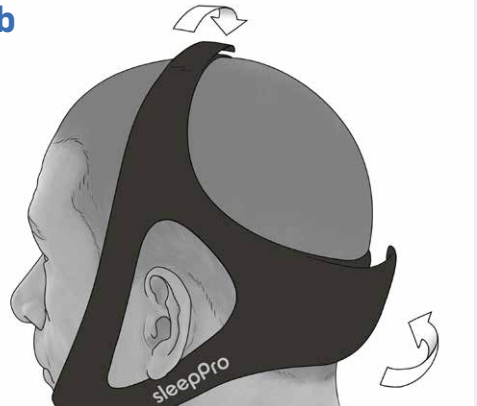

Wasinstructies

- Was de kinband (hand- of machinewas) op een temperatuur lager dan 40 °C
- Gebruik een mild wasmiddel
- Niet centrifugeren
- Niet stomen
- Niet opbergen op een plaats warmer dan 40 °C

Materiaal

- Neoprene

Disclaimer:

Het is erg onwaarschijnlijk, maar mocht u toch significante problemen ondervinden met het gebruik van een SleepPro-Antisnurkband dan accepteert MEDITAS Ltd geen aansprakelijkheid voor de problemen die zijn ontstaan door het gebruik van de SleepPro-producten. Als u problemen ondervindt stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact met ons op.

Distributeur

SleepPro Europe
Postbus 995
1185 AZ Amstelveen
Nederland
info@sleeppro.eu
www.sleeppro.eu

Een product van
Meditas Ltd, Milton Keynes,
Verenigd Koninkrijk