

Fresh & Clean

sleepPro

Reinigingstabletten

Bruistabletten voor reiniging van mondstukken zoals (snurk)beugels, gebitsprotheses, TMJD-producten, sportbitjes, gebitsbeschermers en middelen tegen tandenknarsen. Fresh & Clean doodt 99,99% van alle bacteriën en verwijdert tevens vlekken. In tegenstelling tot andere producten worden pathogene gistsoorten, zoals het ziekmakende *Candida albicans*, eveneens verwijderd.

Houd uw mondstuk langer fris, schoon en bruikbaar

- Elke verpakking bevat 20 tabletten.
- Ideaal voor wekelijks of dagelijks gebruik voor het fris en schoonhouden van uw beugel, gebitsprothese of bitje.
- Dit product veroorzaakt geen veroudering of verkleuring van het kunststof, zoals andere reinigingsproducten.

Richtlijnen voor gebruik

- Borstel de beugel of het bitje onder stromend water af met een zachte gebitsborstel.
- Spoel het zorgvuldig af.
- Leg het mondstuk in een geschikte houder of gebitsbox en voeg één tablet toe voor elke 50 ml lauwwarm water. (Gebruik geen kokend water dat rechtstreeks uit de waterkoker komt, dit zou tot vervorming kunnen leiden.)
- Leg het mondstuk in de bruisende oplossing.
- Laat het mondstuk minimaal 15 minuten in de oplossing liggen. U kunt het mondstuk ook de hele nacht in de oplossing laten liggen. Let op! De oplossing is de volgende ochtend dan verkleurd.
- Het reinigen en desinfecteren van het mondstuk en het verwijderen van pathogene gistsoorten is na 15 minuten voltooid, zelfs als de tabletten nog niet volledig zijn opgelost.
- Spoel het mondstuk voor gebruik onder stromend water af, of laat het in de lucht drogen en berg het op voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJK

- Doe de tabletten niet in de mond.
- **Als de tabletten per ongeluk worden doorgeslikt NIET** beginnen te braken. Schakel direct medische hulp in.
- **Als er contact is met de ogen:** enkele minuten zorgvuldig uitspoelen met water. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door moet spoelen. Als de ogen geïrriteerd blijven, raadpleegt u een arts.
- **Als er huidirritatie optreedt:** raadpleeg een arts. Was de huid die in aanraking is gekomen met het product zorgvuldig af.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaren op een koele, droge plaats.
- Niet innemen.

Bestanddelen

Sodium Bicarbonate, Potassium Peroxomonsulfate, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Menthapiperita/menthaviridis, C173015

SleepPro Europe
Amstelveen, Nederland
+31 20 8225110
info@sleeppro.eu
www.sleeppro.eu
www.snurkgids.nl

