


Tijdens de slaap vernauwde luchtpijp veroorzaakt snurken

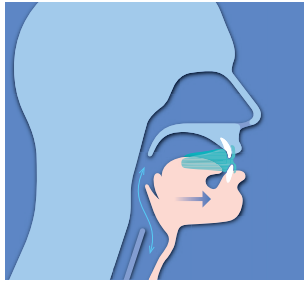

De snurkbeugel houdt de onderkaak voor voren en opent de luchtpijp

## HOE WERKT DE SNURKBEUGEL?

De meest voorkomende oorzaak van snurken is dat er tijdens het slapen een gedeeltelijke vernauwing optreedt van de luchtwegen. De lucht die de vernauwde luchtwegen passeert, veroorzaakt tijdens het ademen trillingen van het gehemelte. De SleepPro snurkbeugel draagt u gedurende de nacht en helpt u om te stoppen met snurken. De anti-snurkbeugels duwen de kaak iets naar voren, wat de luchtweg opent en het gehemelte wat strakker trekt. Daarmee worden trillingen voorkomen en stopt het snurken.

## ZAL HET OOK BIJ MIJ WERKEN?

De SleepPro snurkbeugels werken bij de meeste mensen, maar het beste is om het zelf uit te proberen. Daarom bieden wij verschillende mondstukken aan tegen verschillende prijzen, zodat u makkelijk de SleepPro kunt vinden die bij u past. Kijk op SleepPro.eu voor meer informatie.

## HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK STOP MET SNURKEN?

De SleepPro beugels werken in principe vanaf het eerste gebruik. Als dat niet het geval is, dan moet u wellicht een aantal aanpassingen doen aan de hand van onze handige tips. Als de SleepPro het snurken gestopt heeft, al was het maar kort, dan weet u dat het vooruit duwen van uw kaak helpt om het snurken te stoppen. Dan is het in principe een kwestie van de juiste stand vinden.



Download de Snurkgids:

[www.sleeppro.eu/pages/snurkgids](http://www.sleeppro.eu/pages/snurkgids)

“

*Zo'n simpel, maar effectief product. Ik heb twee grote operaties gehad en dreigde weer te moeten scheiden van mijn partner door mijn zware snurken.*

”

- ✓ Op een snelle en gemakkelijke manier snurken verhelpen
- ✓ Medisch goedgekeurde mondstukken
- ✓ Duizenden tevreden gebruikers sinds 1998
- ✓ Aangeraden door tandartsen en slaapklinieken
- ✓ Goedkoper dan anti-snurkapparaten van tandartsen

Bestel online via

[www.sleeppro.eu](http://www.sleeppro.eu)

of via

telefoon +31 20 8225110  
ma t/m vr 9:00-16:00 uur



SleepPro Europe, Postbus 995, 1180 AZ Amstelveen, Nederland

sleepPro

sleepPro

**ANTI-SNURK MIDDELEN**

Medisch bewezen oplossingen tegen snurken

## SLEEPPRO SNURKBEUGELS

Snurken is een serieus probleem, maar dat hoeft het niet te zijn. Er is namelijk een oplossing! SleepPro snurkbeugels zijn goedgekeurd door de NHS (Britse National Health Service) en worden wereldwijd aangeraden door tandartsen. Bovendien zijn de mondstukken betaalbaar, makkelijk in gebruik en zeer effectief.

## SLEEPPRO SNURKBEUGELS ZIJN GESCHIKT BIJ:

- Primair snurken
- Milde tot matige slaapapneu bij volwassenen, mits onder begeleiding van een medische professional
- CPAP-intolerantie
- Periodiek gebruik bij patiënten die CPAP niet kunnen gebruiken tijdens het reizen en begeleiding krijgen van een medische professional


## CONTRA-INDICATIES

Vraag voordat u overgaat tot aankoop eerst advies aan een arts als u last heeft van:

- TMD (kaakgewrichtsklachten)
- Loszittende tanden of kiezen, kronen, parodontitis of grote ruimtes tussen uw tanden
- Centrale slaapapneu
- Snelle neiging tot kokhalzen
- Als u de kaak beperkt naar voren kunt duwen




*Mijn man en ik zijn zo blij! Ik snurk niet meer en ik slaap langer dan ik in maanden heb gedaan.*

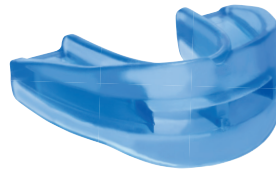

## SLEEPPRO EASIFIT

Onze beginners-snurkbeugel is de meest kosteneffectieve manier om erachter te komen of een snurkbeugel uw snurken zal verhelpen. De Boil & Bite-technologie zorgt ervoor dat u het mondstuk makkelijk zelf kunt monteren en passend kunt maken. Er is tevens gedacht aan ruimte aan de voorzijde, zodat u gemakkelijk adem kunt halen mocht u normaal de neiging hebben om door uw mond te ademen.

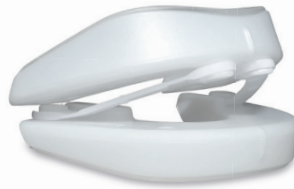

## SLEEPPRO CONTOUR verstelbare snurkbeugel

Als ons standaard model goed werkt, maar u op zoek bent naar een verfijnder model, dan is dit de volgende stap. De SleepPro Contour biedt meer aanpassingsmogelijkheden voor meer comfort. Ergonomische kaakklades omsluiten zowel de boven- als de onderkaak goed en door middel van verwisselbare spanbanden kunt u zelf de juiste kaakstand vinden – er zijn zeven verschillende standen. Ook bij dit model kunt u genieten van de originele Boil & Bite-technologie, zodat u het mondstuk zo kunt verstellen als u wilt.



## SLEEPPRO CUSTOM snurkbeugel op maat

Deze slaapbeugel is een geweldige update als u eerder succes heeft gehad met onze andere SleepPro-modellen, maar op zoek bent naar een volledig op maat gemaakt mondstuk. We sturen u een kit toe, waarmee u thuis een afdruk kunt maken van uw gebit. U volgt simpelweg de meegeleverde gebruiksaanwijzing en stuurt de afdruk naar onze laboratorium toe. Wij maken daar op basis van de afdruk uw snurkbeugel op maat.



## SLEEPPRO EASIFIT STANDARD AM (antimicrobieel)

SleepPro Easifit en SleepPro Custom zijn nu ook beschikbaar met de zogenaamde Silver Ion Protection. Dit wordt veel gebruikt bij medische en hygiënische producten, omdat de ions de bacteriegroei verhinderen. Dit vermindert het risico op de groei van bacteriën die ongewenste geuren veroorzaken.



## DREAM SIPPER Anti-Snurk Training

Via simpele oefeningen die gericht zijn op het correct slikken en de juiste tongpositie, helpt de Dream Sipper om de tong en de keel te versterken. De oefeningen verbeteren de spierspanning en na verloop van tijd tevens de ondersteuning van de bovenste luchtwegen. Dit onderdrukt het snurken en kan er bovendien voor zorgen dat u niet altijd op snurkbeugels hoeft te vertrouwen.

Het zal het snurken niet geheel verhelpen, maar het is een natuurlijke, niet-invasieve manier om het luide snurken enigszins te verminderen. Dit maakt het een ideaal product om samen met een snurkbeugel te gebruiken.



## FRESH & CLEAN Reinigingsproducten

Speciaal reinigingsmiddel in vloeistof- of tabletvorm. In tegenstelling tot veel andere tandheelkundige schoonmaakproducten tast SleepPro Fresh & Clean het materiaal niet aan en zal het plastic niet verkleuren door het gebruik.